



:Tempsmart DC

מעולם לא היה קל כל כך לבצע כתרים וגשרים זמניים!

(עמ' 5)

מבצעי סופשנה

אוקטובר - דצמבר 2020

א.א.י.

בחירת הצמנט להדבקת היתד היא אתגר בפני עצמו, משום שחלק גדול מהכישלונות של מבנים מיידים הוא תוצאה של צמנטציה לקויה¹. ניסיונות להיעזר בידתות הזכוכית למטרת העברת אור להקשיית צמנטי רזין מוקשי-אור לא עמדו במבחן²⁻⁴, מה שמותיר אותנו עם צמנטים בעלי יכולת הקשיה עצמית או הקשיה כפולה. צמנטים מבוססי יונמר הזכוכית משופר-רזין (Resin-modified Glass Ionomer) מהדורות האחרונים מספקים תוצאות משביעות רצון, אולם הפתרון האידיאלי מסתמן בצמנטים מבוססי רזין, בדגש על צמנטי רזין קונבנציונליים בעלי הקשיה כפולה, כאשר צמנטי רזין בעלי קישור עצמי (self adhesive) כחות מומלצים למטרה זו^{4,8-10}.

Gradia Core, צמנט רזין בעל הקשיה כפולה, מספק פתרון מעניין במיוחד לאתגר זה, משום שאינו משמש רק כצמנט חזק במיוחד להדבקת היתד בתעלת השורש, ליתדות מתכתיות או יתדות מבוססות סיבי זכוכית, אלא מתאים גם כחומר ליבה להשלמת כותרת השן^{7,9,10}. מדובר בחומר מרוכב בעל טיקסטורופיות גבוהה - תחת לחץ הוא זורם היטב, וממלא את המרווחים שסביב היתד באופן מיטבי, ללא יצירת בועות ותוך קישור מיטבי הן לחומר הקישור (בקישור אדהזיבי) והן ליתד (בקישור מיקרומכני ומכני), וכאשר לא מופעל עליו לחץ הוא אופטימלי לבניית הליבה הכותרתית, מאחר והוא יציב ומאפשר עיצוב נוח של השחזור הכותרתית^{7,11}. בזכות השימוש הכפול כצמנט וכחומר ליבה, **Gradia Core** מאפשר גם המשכיות וקישור חזק בין הצמנט שבתעלת השורש לחומר השחזור הכותרתית וגם מאפשר לקצר את משך העבודה בפה המתרפא.

Gradia Core מסופק כקלט עם חומר קישור אוניברסלי (G-Premio BOND) ומשפיע להקשיה כפולה, המאפשרים הסרה מיטבית של שכבת המרח בתעלת השורש, לצד קישור חזק ובטוח גם באזורים שאינם נגישים להקשיה באור. בזכות ההקשיה הכפולה הוא מאפשר שחזור בטכניקה של Bulk fill, ללא מגבלה על עומק ההקשיה^{8,10} ותוך השגת חוזק גבוה לכפיפה הן בהקשיה כימית (135 MPa) והן בהקשיה באור (154 MPa)¹¹. הוא בעל רמת רדיו-אופאקיות גבוהה (271% AI), בעל מודול אלסטיות הדומה לזה של הדנטין (10.8 GPa) ומעניק תחושה דומה לזו של הדנטין בעת השחזתו, דבר המקל על מעבר חלק בין חומר המבנה לחומר השן ומניב שוליים חלקים ומדויקים. כך, שימוש ב-**Gradia Core** לשתי מטרות - הדבקת היתד והשלמת כותרת השן - מתאפשר מבלי להתפשר על איכות ההדבקה או על איכות ההשלמה הכותרתית.

השלמת כותרת השן לאחר טיפול שורש היא שלב הכרחי בתהליך שיקום התפקוד התקין של השן. מבנה, הכולל ליבה המשלימה את כותרת השן למטרת עיגון השיקום הכותרתי (כתרגשר) ומחוברת ליתד המעניקה לה אחיזה (רטנציה) בחלק הכותרתי של תעלות השורש, הוא הפתרון המקובל ברפואת שיניים כבר שנים רבות, כאשר השאיפה היא לשמר חומר שן בריא ולצמצם את השימוש ביתד במידת האפשר, תוך שקילת היקף חומר השן הכותרתי השארי^{1,2}.

במקרים בהם נדרש שימוש ביתד לצורך עיגון המבנה, קיים טווח של פתרונות, כאשר בשנים האחרונות התרחב השימוש במבנים מיידים בכלל, וביחוד במבנים מיידים המבוססים על יתדות שרף מחוזק סיבים (המכונים Fiber Posts). מגמה זו נובעת משילוב של מספר גורמים: (א) הבנת הכוחות המופעלים על השן ע"י הפתרונות השונים. מחקרים רבים הציגו את המגבלות והסיכונים בביצוע מבנים יצוקים - החל מהסרת חומר שן רב עקב הצורך בהכנה מתבדרת (Divergent), המשך בצורך בשילוב מעבדה וביצוע בשתי ישיבות, וכלה בסכנה של העברת כוחות שאינה מיטבית ועלולה לגרום לשברים בשורש השן, כאשר שימוש בידתות מסיבי זכוכית מאפשר פיזור כוחות עדיף^{2,3}. (ב) דרישות אסתטיות: התרחבות השימוש בכתרים אסתטיים הביאה לצורך בביצוע מבנים בגוון השן, בהם יימנע הסיכוי של השתקפות היתד או ליבת המבנה כלפי חוץ; (ג) שיפורים טכנולוגיים: השיפור בטכנולוגיית החומרים המרוכבים, וביחוד התבססות רפואת שיניים מבוססת-אדהזיה, לצד שיפורים בעמידות החומר ובטכניקת הביצוע של יתדות מבוססות סיבי-זכוכית^{4,5}.

יתדות השרף מחוזקות-הסיבים ("פייבר פוסט"), שהוצגו לראשונה ב-1988⁴, מציעות מגוון תכונות אידיאליות - אסתטיקה משופרת, תכונות מכאניות הדומות לאלו של הדנטין, אחיזה מיטבית תוך הסרה מזערית של חומר שן, פיזור מאמצים הומוגני לאורך השורש ועמידות בפני כוחות שלפיפה^{4,6}. גם בתחום זה חלו שיפורים בשנים האחרונות, עם מגוון של חלופות - החל מיתדות תעשייתיות בעלות חתך עגול, כגון GC Fiber Posts, שהוכיחו עצמן במחקרים רבים כאופציה חזקה ועמידה לאורך זמן⁷, המשך בידתות הניתנות להתאמה ועיצוב בהתאם לצורת תעלת השורש, כגון everStickPOST[®], ועד ליתדות בהדפסת תלת-ממד⁹.

1. Assif D, Gorfil C, J Prosthet Dent 1994; 71:565-7.
2. Zhu Z et al., Int J Prosthodont 2015; 28:475-483.
3. Eliyas S et al., Br Dent J 2015; 218(2):53-62.
4. Frydman G et al., Refuat Hapeh Vehashinayim 2013; 30(3):6-14, 60.
5. Tangsripongkul P et al., J Endod 2020 (in press).
6. Plotino G et al., Dent Mater 2007; 23(9):1129-35.
7. Juloski J et al., J Dent Res 2014; 93(7 Suppl):525-585.
8. Vilkinis V, Žilinskis J, Stomatologija 2016;18(1):32-6.
9. Tsintsadze N et al., Am J Dent 2017; 30(5):248-254.
10. Roberts H et al., J Prosthodont 2020 (in press).
11. Ding H et al., J Prosthet Dent 2014; 112(5):1231-7.



בניית ליבת המבנה באמצעות GRADIA CORE



בדיקת התאמת היתד וקישור באמצעות שילוב של (DCA) Dual Cure Activator עם G-Premio BOND




מצב ראשוני

Courtesy of Giancarlo Pongione, Italy



עיצוב ליבת המבנה והשחזה שן מאחזת לכתר

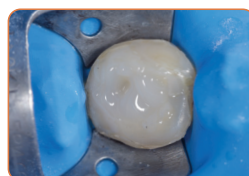

בניית מבנה עם GRADIA CORE



לאחר טיפול שורש



מצב התחלתי

Courtesy of Giancarlo Pongione, Italy

Gradia Core

חזק כסלע - בכל עומק

חומר מרוכב בהקשייה לבניית ליבה למבנה ולהדבקת יתדות



- "שני חומרים בשכופרת אחת" - מוצר אחד להדבקת היתד ובניית ליבת המבנה.
- טיקסוטרופיות אידיאלית - משמש גם להדבקת יתדות, בזכות זרימה מעולה תחת לחץ, וגם לבניית הליבה הכותרתית, בזכות יציבות מעולה ויכולת פיסול כשאינו תחת לחץ.
- פולימריזציה מעולה גם במקומות ללא גישה לאור, בזכות ההקשייה הכפולה (כימית + באור).
- חזק במיוחד (חוזק לכפיפה: 154MPa בהקשיה כפולה) ויציב במיוחד, בזכות מודול אלסטיות הדומה לדנטין
- חסכוני, יציב, ונוח לשימוש

ומקבלים G-Premio BOND
בשווי 250 ₪ מתנה!

ב-650 ₪

רוכשים סט*
Gradia Core

*תכולת הערכה:

- 1 שפופרת Gradia Core (תכולה: 10 מ"ל)
- 1 בקבוק G-Premio BOND (תכולה: 5 מ"ל)
- 1 בקבוק G-Premio BOND DCA (תכולה: 3 מ"ל)
- קופסת מיקרו-מברשות
- אקדח יישום 1:1
- פיות ערבוב אוטו-מיקס + אוטו-מיקס אנדו

פולימריזציה מיטבית של כל הרכיבים

אפילו במצב של הקשייה עצמית (כימית),
GRADIA CORE מוקשה באופן יעיל. ניתן
להשתמש בו בטכניקה של Bulk Fill ללא
מגבלה על עומק ההקשייה.

154 GRADIA CORE (DC)

135 GRADIA CORE (SC)

139 Rebuild DC (DC)

128 Rebuild DC (SC)

132 Luxacore Z Dual (DC)

98 Luxacore Z Dual (SC)

(DC) Dual cure mode; (SC) Self cure mode
Source: GCC R&D - Data on file.



חוזק לכפיפה
Flexural Strength
(MPa)



ומקבלים G-Premio Bond
בשווי 250 ₪ מתנה!

ב-1250 ₪

ברכישת
3 רפילים



EQUIA Forte™ HT

גלאס ינומר חזק לשחזורים אחוריים,
עם הפרשת פלואוריד קבועה
ואסתטיקה משופרת.



- שקיפות משופרת של חומר השחזור,
- לתוצאה טבעית ואסתטית לאורך זמן
- פיזור חלקיקים מיטבי, לשיפור החוזק
- לשחזורים אחוריים קבועים Class I + Class II
- הנחה כ-Bulk, ללא רגישות ללחות!




ההתוויות העיקריות ל-EQUIA Forte HT

פתרון מושלם להחלפת שחזורי אמלגם לקויים



באדיבות Dr. M. Basso, איטליה

שחזורים אחוריים קלים לביצוע במספר שלבים פשוטים - ללא צורך בבידוד מלא

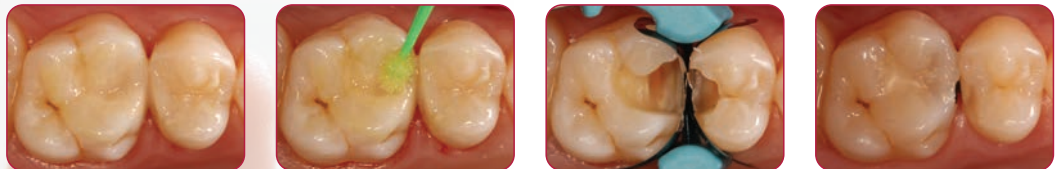

באדיבות Dr. Z. Bilge Kütük, טורקיה

שחזור של שיניים רגישות, עם תת-הסתיידות ו-MIH במתרכפים צעירים



באדיבות Dr. P. Rouas, צרפת

קונים EQUIA Forte HT
מארץ 250 יח'

מחיר כולל:
₪ 1,860

ומקבלים 2 שפופרות
G-aenial Anterior
בגוון A3 בשווי 300 ₪
מתנה!



TEMPSMART™ DC


הנסיעה החלקה
לשחזור הסופי שלך




קומפוזיט בהקשיה כפולה לכתרים וגשרים זמניים

הדור הבא של כתרים וגשרים זמניים חכמים מחומר מרוכב:

- חזקים יותר, לביצוע מהיר ברמת דיוק גבוהה
- הקשייה כפולה (כימית + באור)
- לא דביק, לליטוש מהיר ונוח
- 6 גוונים: A1, A2, A3, A3.5, B1, BW

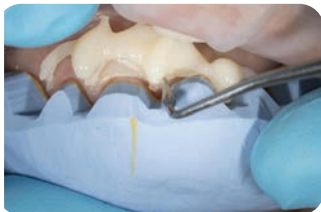

4. הסרת עודפי חומר השחזור הזמני

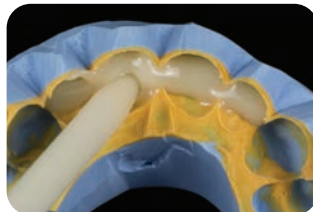

3. הזרמת TEMPSMART DC למטבע המבוסס על Wax-up מעבדתי



2. השיניים לאחר השחזה



1. שיניים המיועדות לציפויי חרסינה



7. התוצאה הסופית של ציפויים זמניים מבוססי TEMPSMART DC



6. ליטוש הציפויים הזמניים



5. הקשיה באור של הציפויים הזמניים

קונים 2 חב' Tempsmart


מחיר כולל: ₪ 595

ומקבלים חב' Exaclear בשווי 250 ש"ח (2 שפוכרות) מתנה!

EXACLEAR

חומר מטבע שקוף באמת (97.3% שקיפות), המאפשר הקשיית חומרים מרוכבים דרך חומר המטבע.



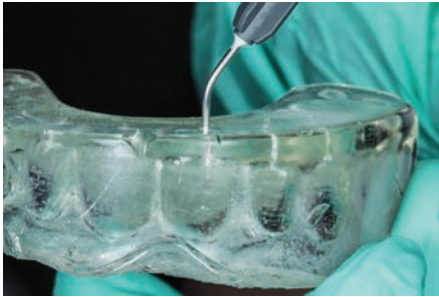

לאחר לקיחת מטבע של ה-Wax-up
באמצעות Exaclear מתבצע חירור של פתח
הזרקה




Wax-up מעבדתי של המצב הסופי הרצוי



מצב קודם. המתרכאה הביעה רצון לשפר את
צורת השיניים ולסלק שחזורים מרוכבים ישנים



הסרת שאריות החומר המרוכב באמצעות
סקלפל

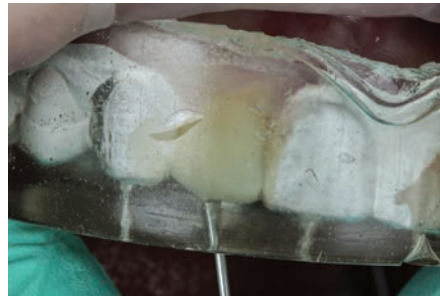

הזרקה לתבנית באמצעות
G-aenial Universal Injectable,
להשלמת כותרת השן



ההשלמה מתבצעת שן אחר שן. כל שן בודדה
באמצעות סרטי טפילון, עברה צריבה בחומצה
פוספורית 37% וקישור באמצעות G-Premio BOND.



הצורה הסופית של השיניים לאחר גמר הטיפול בשיניים 13-23.



ליטוש השיניים בוצע באמצעות גומיות, סרטי
ליטוש ומברשת ליטוש

בואו להכיר וליישם:
partial & full injection molding technique

בקורס

הרמת מנשך אחורי


מרצה: ד"ר הנרי רון



הקורס יתקיים בתאריכים: 14.12.20, 16.11.2020

במרכז ההשתלמויות IDS, קויפמן 4 ת"א

פרטים והרשמה בטל' 03-7979600/3

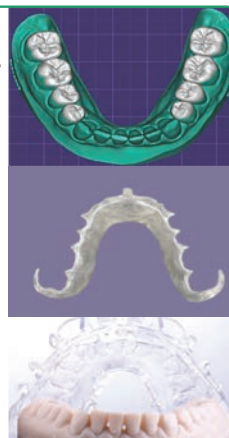


Injection Molding Kit

(EXACLEAR + G-aenial Universal Injectable)



הדגמת ציפוי קומפוזיט אסתטיים

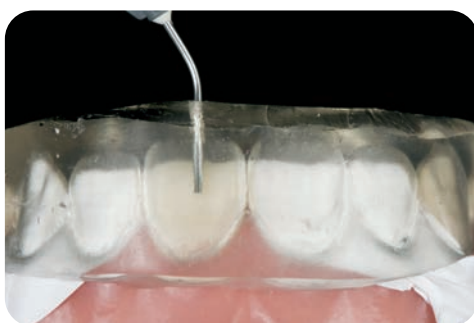

EXACLEAR

חומר מטבע שקוף באמת (97.3% שקיפות), המאפשר הקשיית חומרים מרוכבים דרך חומר המטבע.

G-aenial Universal Injectable

קומפוזיט בהזרקה, לשליטה אוכטימלית ושימוש נוח וקל - זורם כמו נוזלי, חזק יותר ממשחתי!



המהפכה כבר כאן!

פיתחים אפשרויות קליניות חדשות באמצעות חומרים כורצי-דרך:

- יצירת תבניות לשחזורים וציפוי קומפוזיט אסתטיים בהזרקה
- הגבהת סגר אחורי
- הדבקה מהירה של סמכים וקיבועים

ב- 380 ₪ בלבד!

במקום 500 ₪

Injection Molding Kit*

*הקית כולל:

- 1 שפופרת Exaclear
- 3 מזרקי G-aenial Universal Injectable בגווי A1, A2, A3

כך מטבע שקופה - מתנה!

G-CEM™ Veneer

נוחות שימוש, חוזק ואסתטיקה
מעל למצופה!



דבק שרף מוקשה-אור להדבקה קלה וחזקה של ציפויי חרסניה ומילואות

- זרימה בטיקסוטרופיות אידאלית, להנחה קלה
- מילוי חלקיקים גבוה בפיזור הומוגני, לחוזק מרבי
- הקשייה באור בלבד, ליציבות צבע לאורך זמן
- גוונים: A2, Translucent, Opaque, Bleach
- כולל משחות בדיקה Try in לווידוא גוון הצמנט



באדיבות Dr. J. Mattiussi, איטליה



ב- 790 ₪ בלבד!

במקום 990 ₪


G-CEM™ Veneer*

*סט היכרות, הכולל 2 שפופרות G-CEM Veneer, טיפים להזרמה, חומר קישור G-Premio BOND, בקבוק G Multi Primer, מיקרו-מברשות, 2 שפופרות Try-in Paste לבדיקת צבע.

G-CEM LinkAce™



לשלוף את האס המנצח ברגע הנכון...
 ♥ חדשנות ♠ פשטות ♦ רב-תכליתיות ♣ אמינות

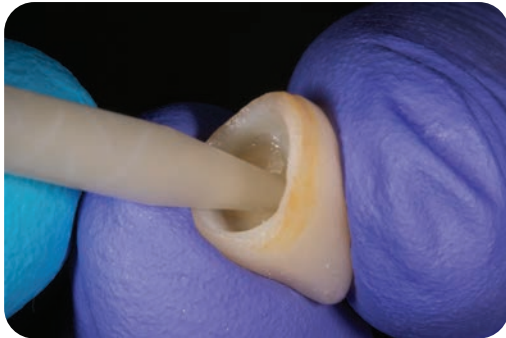

- צמנט רזין בקישור עצמי, עם הקשיה ככולה, ללא צורך בהכנה מוקדמת של השן או בחומר קישור
- בעל קישור כימי למתכת ולזירקוניה
- להדבקה קבועה חזקה של כל סוגי הכתרים, הגשרים, המבנים והיתדות, עם מתכת או בלעדיה (מתכת, חרסין, זירקוניה, ליתיום דיסיליקט, קומפוזיט).

האופציה המועדפת לכל צרכי השיקום

G-CEM LinkAce: הדור החדש של דבק על בסיס שרף בעל קישור עצמי, המתבסס על דורות קודמים ומוצלחים מבית GC, בתוספת פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים בתחום ההתקשות הכימית. **G-CEM LinkAce** הוא אסתטי, בעל תכונות פיזיקליות מתקדמות, מונע רגישות לאחר הטיפול ונוח לשימוש.



באדיבות Dr. Frederic Raux, צרפת



באדיבות Dr. Emmanuel D'Incau, צרפת



קונים G-CEM LinkAce ו-Fiber Post

במחיר:
 ₪ 650

כולל:
 מארז G-CEM LinkAce
 (2 שפופרות) וסט של 15
 פיבר-פוסטים ו-2 מקדחים



יתדות סיבי זכוכית - GC Fiber Post

- בעלות חוזק גבוה לכפיפה, לצד מודול אלסטיות דומה לדנטין
 - קצה משופע, להכנה קלה ושימור חומר שן בריא
 - רדיו-אופאקיות, לאבחנה קלה
- הקוט ההתחלתי כולל 15 פוסטים - חמישה מכל אחד משלושה קטרים (1.0 מ"מ, 1.2 מ"מ, 1.4 מ"מ) ו-2 מקדחים (1.2 מ"מ, 1.4 מ"מ).

FujiCEM Evolve

הדור הבא



צמנט הגלאס יונומר המוביל בעולם -
עכשיו חזק יותר, בהיר יותר ונוח יותר!

- צמנט גלאס יונומר מחוזק ברזין, עם הפרשת פלואוריד שנמשכת ונמשכת...
- חדש!! מזרק נוח לשימוש, עם צמיגות קלה לשליטה
- חוזק קישור משופר
- להדבקה מהירה: סביל ללחות ואינו דורש בידוד של השן
- גוון בהיר יותר, לתוצאות אסתטיות יותר
- מאפשר הקשיה קצרה באור (tack cure), להסרה קלה ובטוחה של עודפים עם ההדבקה
- כולל טיפים Automix, אך מתאים גם לערבוב ידני



באדיבות Dr. J. Tapia Guadix, ספרד



ב-790 ₪ בלבד!

במקום 990 ₪

3 מזרקי FujiCEM Evolve
(כולל טיפים לערבוב אוטומטי)*

*מתאים גם לערבוב ידני

Fuji TEMP LT



מושלים לשתלים!

- דבק זמני ע"ב גלאס יונומר, לטווח ארוך או קצר
- אידיאלי להדבקה ממושכת לזמן ארוך של שיקום על שתלים
- לא מהווה סיכון ליצירת פריקורוניטיס
- מתאים לכל סוגי השיקום המודבק, ללא פגיעה בהדבקה הקבועה העתידית
- הפרשת פלואוריד לאורך זמן
- קל ונוח לעבודה, עובי שכבה דק (6 מיקרון), קל לסלק עודפי חומר
- ביוקומפטבילי ולא מהווה סיכון ליצירת פריקורוניטיס



באדיבות Dr. M. Yamazaki, יפן



קונים 2 מארזי
Fuji TEMP LT

במקום 1,200 ₪
ב- 990 ₪
בלבד!

ומקבלים TEMPSMART
קומפוזיט בהקשיה כפולה
לכתרים וגשרים זמניים
מתנה!



Initial™ LiSi Press



מטילי חריטה (Ingots)
בטכנולוגיית HDM
(High Density Micronization)

הגיע הזמן להפסיק ללכת עם העדר – ולהתחיל להוביל!

- ליתיום די-סיליקט עם חוזק לכפיפה ללא תחרות: 508MPa
- אסתטיקה טבעית בכל מצב, הודות לתכונות פלואורסנציה מצוינות
- התאמת שוליים מצויינת הודות לפיזור הומוגני של מיקרו-חלקיקים



מבצע 1

קונים 5 חבילות LiSi Press Ingots
במחיר 330 ₪ לחבילה

בשווי 350 ₪

ומקבלים במתנה
LiSi PressVest Intro Kit



מבצע 2

קונים 10 חבילות LiSi Press Ingots
במחיר 330 ₪ לחבילה

בשווי 950 ₪

ומקבלים במתנה
LiSi PressVest 6 ק"ג
+ נזול

קורסים



שיקום אסתטי וציפויים
עם ליתיום דיסיליקט בדחיסה

מר מוריס פרץ
מפגש אחד



הקורס יערך במרכז ההשתלמויות IDS רח' קויפמן 4 תל אביב
לפרטים והרשמה: 050-5357075



Aadva Lab Scan 2

הדור הבא של סורקים מעבדתיים: פשטות. דיוק. יעילות.

- הדור הבא של סורקים מעבדתיים מבית GC, עם רמת דיוק ואיכות ללא תחרות!
- סורק ברזולוציית 5MP, עם סריקת צבע מלאה
- מתאים לסריקה של מודלים ומטבעים מכל הסוגים, כולל triple tray
- רזולוציית סריקה של $4 \mu\text{m}$ (בהתאם ל-ISO 12836)
- מהיר ויעיל - סריקת לסת מלאה ב-22 שניות
- קבצים פתוחים (STL, PLY) עם תאימות מלאה ל-Exocad
- נוח לתפעול, עם מסך מגע
- מסופק עם תוכנות ההפעלה, ללא Exocad.
- התקנה תבוצע על מחשב העומד בדרישות המינימום של היצרן

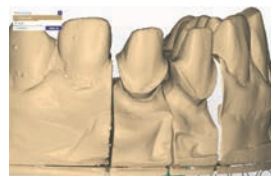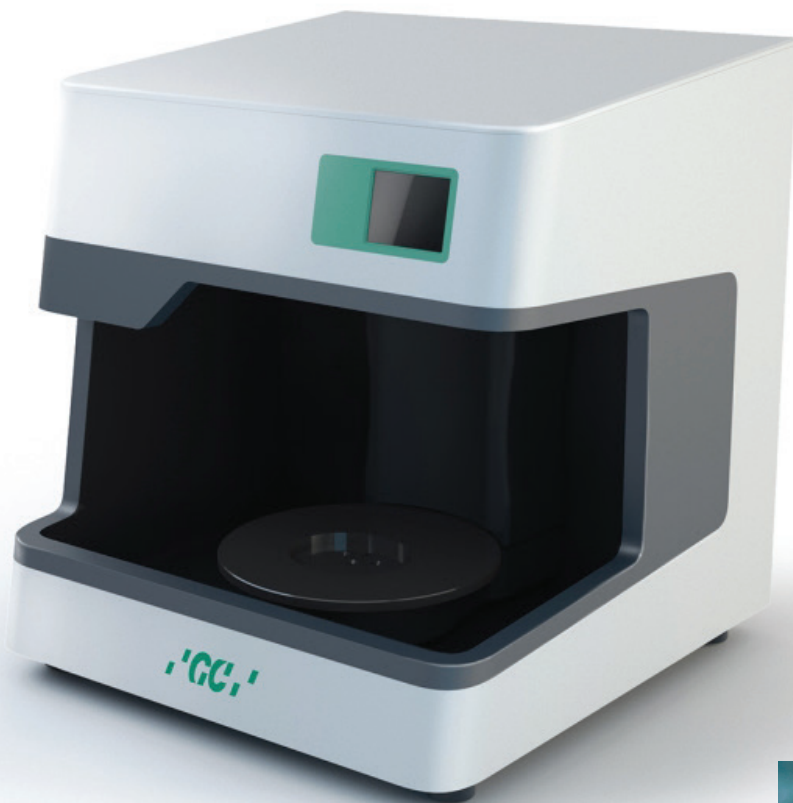

קונים סורק מעבדתי
Aadva Lab Scan 2

ב-52,800 ₪ בלבד!

במקום 65,000 ₪

מוצרי TOMY - מעכשיו רק ב-GC Orthodontics!

המוצרים שכל מרפאה אורתודונטית חייבת,
עכשיו זמינים במחירים אטרקטיביים!



- ☑ Self-ligating brackets (ceramic, metal)
- ☑ Orthodontic bands
- ☑ Ligatures
- ☑ TOMY Archwire lines
- ☑ Archwires (Initialloy, Bio-Edge, Bio-Active)
- ☑ GC Ortho Connect
- ☑ GC Ortho Connect Flow
- ☑ Buccal tubes

and more...



מוצרי TOMY - רק ב-GC Orthodontics!

לפרטים: חגית 054-5663608

מרכז IDS משיק קורסים חדשים

קורס הרמת מנשך אחורי

תאריך פתיחה:
16.11.20
14.12.20

חדש!

מרצה:



ד"ר הנרי רון

קורס זה יסקור את התופעה של שחיקת המשנן, יבחן את אפשרויות לטיפול ואת הגורמים להחלטה על התערבות טיפולית, ויכלול תרגול של הרמת המימד הסגרי האנכי ("הרמת מנשך") באמצעות ביצוע של השלמות קומפוזיט בהזרקה.

הקורס תיאורטי ומעשי - מפגש יחיד בן 6-7 שעות וכולל הרצאה פרונטלית, הדגמה ותרגול על מודלים תחת הדרכה.



קורס מתקדם בתפעול ופענוח CBCT

תאריך פתיחה:
02.12.20

חדש!

מרצים:



ד"ר מיכאל סולמונוב



ד"ר קרן יודניץ



פרופ' יהודה צדיק



חיים אלמוג



ד"ר אולג ליוזנוב




ד"ר ג'ו בן יצחק

קורס המעניק למשתתפיו את הנדרש לעמידה בדרישות משרד הבריאות בתפעול ואבחון CBCT (נוהל 2.8) - והרבה מעבר לכך!

שורת מומחים מובילים - ברפואת הפה, אנדודונטיה, כירורגית פה ולסתות ורנטגנולוגיה - ילמדו אתכם כיצד להוציא את המיטב מהשימוש ב-CBCT, כולל אבחון וביצוע שתלים ואוגמנטציה, אבחון CBCT אנדודונטי, אבחון נגעים שונים ועוד.

הקורס כולל 30 שעות פרונטליות (4 מפגשים), בנוסף על עבודת בית ותרגול מעשי.

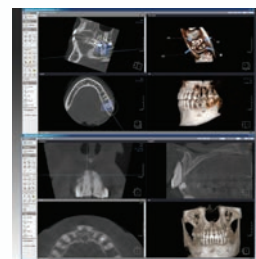

חיפוי חרסינה סגריים

קורס הכולל טיפול במתפא

תאריך פתיחה:
24.02.21

חדש!

מרצים:



ד"ר סיון שוחר



ד"ר אילן גלבווע

קורס קליני חדש, בהדרכת ד"ר אילן גלבווע וד"ר סיון שוחר* - כל מה שהייתם צריכים כדי לבצע Inlay, Onlay, Overlay, כתר-אנדו בבטחון והצלחה!

הצטרפו לקורס בן 3 מפגשים, הכולל טיפול מלא במתפא, ללימוד מעמיק של בחירת מקרה, הבנת תהליכי הביצוע, סריקה דיגיטלית וחריתה, פרוטוקולי הדבקה ועוד.

*ד"ר אילן גלבווע (לשעבר ראש האיגוד הישראלי לשיקום הפה) וד"ר סיון שוחר (מומחית לשיקום הפה, ארה"ב) הם חברי סגל המחלקה לשיקום הפה באוניברסיטת ת"א.



לפרטים והרשמה: 03-7979600/3

למידע מפורט וקורסים נוספים: www.ids4u.co.il

4 Koifman st. Tel Aviv 68012 Tel: 972-3-7979600, Fax: 972-3-5161547 ids@ids4u.co.il

מידעון קורסים

אוקטובר - דצמבר 2020

מרכז ההשתלמויות ברפואת שיניים IDS שמח לעדכן אתכם במועדי פתיחת הקורסים הקרובים:

שימוש יום יומי ב-CBCT
ד"ר מיכאל סולומנוב, ד"ר ג'ו בן יצחק, ד"ר אולג לוינזון
25.11.20 - מפגש אחד

קורס מתקדם בתפעול ובפענוח CBCT
פרופ' יהודה צדיק, ד"ר מיכאל סולומנוב, ד"ר ג'ו בן יצחק,
ד"ר אולג לוינזון, ד"ר קרן יודוביץ', מר חיים אלמוג
02.12.20 - 4 מפגשים

טיפול שמרני ואפקטיבי באמצעות סילון אבקה אקטיבית
ד"ר סטפן שאולוב
06.12.20 - מפגש אחד

טיפול שורש בשיניים קבועות צעירות עם אפקס פתוח
ד"ר מיכאל סולומנוב, ד"ר ג'ו בן יצחק
09.12.20 - מפגש אחד

הרמת מנשך אחורי
ד"ר הנרי רון
14.12.20 - מפגש אחד

כתרים והשחזות בעידן המודרני
ד"ר משה פלייטמן, ד"ר ביאטריס פלייטמן, ראובן אוליאל
15.12.20 - 6 מפגשים

היבטים אורתודונטיים בעבודת רופא השיניים לילדים
ד"ר יואב שפינקו
16.12.20 - מפגש אחד

שיפור רווחיות המרפאה
גב' דליה סרויה
20.12.20 - 4 מפגשים

שתלים למתחילים (תרגול על ראשי גוויות)
פרופ' אלי רביב (קנדה)
27.12.20 - 3 מפגשים

כירורגיה זעירה
פרופ' אלי רביב (קנדה), ד"ר נעמה סאמט
28.12.20 - 3 מפגשים

חזיתיות חרסינה - עבודת צוות (כולל טיפול במתפא)
ד"ר משה פלייטמן, מר מוריס פרץ
28.12.20 - 3 מפגשים

חיפוי חרסינה סגריים
ד"ר אילן גלבע, ד"ר סיון שוחר
24.02.21 - 3 מפגשים

טיפול שורש בשיניים קבועות צעירות עם אפקס פתוח
ד"ר מיכאל סולומנוב, ד"ר ג'ו בן יצחק
28.10.20 - מפגש אחד

השתלמות בגז צחוק
ד"ר אורי זילברמן
29.10.20 - מפגש אחד

שיקום אסתטי וציפויים עם ליתיום דיסיליקט בדחיסה / לטכנאי שיניים
מר מוריס פרץ
29.10.20 - מפגש אחד

"ארגז כלים פרקטי" לאנדודונטיה יום יומי
ד"ר מיכאל סולומנוב, ד"ר ג'ו בן יצחק, ד"ר אולג לוינזון
04.11.20 - 4 מפגשים

שיקום על גבי שתלים
ד"ר בני כרמון
09.11.20 - 4 מפגשים

הבהרת שיניים ("הלבנה")
ד"ר משה פלייטמן
10.11.20 - מפגש אחד

קורס מקיף ברפואת שיניים לילדים
ד"ר אורי זילברמן, ד"ר מיכאל סולומנוב, ד"ר ג'ו בן יצחק, ד"ר יואב שפינקו
12.11.20 - 6 מפגשים

השתלמות בגז צחוק
ד"ר אורי זילברמן
12.11.20 - מפגש אחד

היבטים אורתודונטיים בעבודת רופא השיניים לילדים
ד"ר יואב שפינקו
12.11.20 - מפגש אחד

הרמת מנשך אחורי
ד"ר הנרי רון
16.11.20 - מפגש אחד

פריו-כירורגיה באמצעות הלייזר הדנטלי
ד"ר מחמוד יונס, ד"ר אריאל סבין
17.11.20 - מפגש אחד

קורס מקיף באנדודונטיה
ד"ר מיכאל סולומנוב
18.11.20 - 7 מפגשים

לפרטים נוספים ולהרשמה: 03-7979600/3

מידע מפורט באתר האינטרנט החדש שלנו: www.ids4u.co.il

4 Koifman st. Tel Aviv 68012 Tel: 972-3-7979600, Fax: 972-3-5161547 ids@ids4u.co.il